

STERANIOS 2%

STERANIOS 2% NG STERANIOS 2% ECS STERANIOS 20% Concentré

BANDELETTES DE CONTROLE DU TAUX DE GLUTARALDEHYDE

INDICATIONS

Contrôle du taux de Glutaraldéhyde actif au sein des solutions de désinfection totale à froid.
STERANIOS 2%
STERANIOS 2% NG
STERANIOS 2% ECS
STERANIOS 20 % CONCENTRE

MODE D'EMPLOI

- Tremper totalement le papier indicateur dans la solution à tester pendant 1 seconde.
- Eliminer l'excès de solution par une légère agitation de la bandelette.
- Lire le résultat 1 minute après trempage. Ne plus interpréter un résultat obtenu pour une lecture réalisée plus de 2 minutes après trempage.

COMPOSITION

Bandelettes imprégnées d'un réactif spécifique au glutaraldéhyde.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le flacon fermé entre + 15°C et + 25°C dans un endroit sec.

Délai limite d'utilisation après première ouverture : 6 semaines.

Date d'ouverture :

TESTING STRIPS OF GLUTARALDEHYDE RATE

INDICATIONS

Control of reactive Glutaraldehyde level in cold sterilization solutions :
STERANIOS 2%
STERANIOS 2% NG
STERANIOS 2% ECS
STERANIOS 20% CONCENTRE

INSTRUCTION FOR USE

- Totally soak the indicating paper in the solution to be tested during 1 second.
- Remove the solution excess by quick draining on absorbent paper.
- Read after 1 min. Do not analyse the result more than 2 min after the soaking.

COMPOSITION


Test strips impregnated with reactive agent specific to glutaraldehyde.

STORAGE CONDITIONS

Keep the flask firmly closed at a temperature between +15°C and +25°C, in a dry area.

Use the test strip in the 6 weeks following the first flask aperture.

Aperture date :

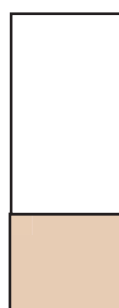

NON CONFORME
NO CONFORM



CONFORME
CONFORM

